

the AQUALIZER^{T.M.}

- Differenzialdiagnose bei atypischen Gesichtsschmerzen
- Überbrückung zwischen Physiotherapie und Bisseinstellung
- Soforthilfe bei Kiefergelenkbeschwerden



Der konfektionierte temporäre Aufbissbehelf, der sich selbst anpasst. Die verbundenen Wasserpolster gleichen den Okklusaldruck an und sorgen für die gleichmäßige Abstützung der Kiefergelenke. Schutz- und Schohnhaltungen des Kiefers können entfallen, die Kaumuskelatur entspannt, der Tonus harmonisiert sich.

Das Einsetzen des Aqualizers:

- Der Aqualizer wird entsprechend der Abbildung so eingesetzt, dass die Wasserpolster zwischen den Seitenzähnen liegen, der Verbindungsschlauch liegt in der Umschlagfalte zur Wange. Nicht mit den Zähnen auf die Wasserpolster pressen!

Differenzialdiagnose Okklusion:

- Bei aufrechter Körperhaltung den Unterkiefer locker hängen lassen. Unterkiefer kraftfrei schließen und den ersten Berührungspunkt zwischen den Zahnreihen ermitteln.
- Aqualizer 10-20 Minuten tragen, obige Ermittlung des Erstkontaktes wiederholen.
- Ergibt sich eine deutliche Veränderung der Kontaktsituation, sollte der Zahnarzt zu Rate gezogen werden.

Chronische Schmerzen und CMD:

- Aqualizer mehrere Stunden, oder besser noch während der Nachtruhe, tragen.
- Veränderungen in der Symptomatik (z. B. Nacken-, Gesichts-, oder Kopfschmerzen) ermitteln.
- Vorkontakte, bzw. Mangel an Kontakt, zwischen Zähnen nach Tragen des Aqualizers ermitteln.
- Sind klare Zusammenhänge erkennbar, so ist der Zahnarzt zwecks einer neuromuskulären Aufbisstherapie zu Rate zu ziehen.

Zwei Stärken

- "Medium" für die normale Bisshöhe.
- "High" für das Testen von Bisshebungen bei Tiefbissen.

Zwei Formen

- "Classic" ist der bewährte originale Aqualizer.
- "Ultra" bietet eine neue Führung des Verbindungsschlauches für noch weniger Potential zur Irritation der Wangenschleimhaut.

Vorratshaltung

- Im Gefrierfach ist der Aqualizer praktisch unbegrenzt haltbar. Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte!

MEDIPLUS[®]

Kolmhof 2 /

Tel. 09198-998690

D-91364 Unterleinleiter

Fax 09198-998691

www.mediplus.org ✦ info@mediplus.org